



Mascherina chirurgica monouso

Ipoallergenica - 3 strati in TNT - non sterile

GRUPPO GDA
S.P. 362 km 15,700 - Galatina (LE) - 73013 - Italy
gruppogda.it / info@gruppogda.it
Tel. 0836 562531 - 0836 569443 / Fax 0836 631418
P.iva 04179290756

REF GDA-MASK-01

Istruzioni per l'uso



DISPOSITIVO MEDICO UNI EN 14683 TIPO II

Pericolo

Una mascherina facciale ad uso medico aiuta a proteggere da determinati contaminanti, ma non elimina in assoluto l'esposizione o il rischio di contrarre qualsiasi malattia o infezione. **L'uso improprio può provocare malattia o morte.** Per un uso corretto, consultare il supervisore e queste istruzioni per l'uso.

Pericolo



Prima di utilizzare la mascherina leggi attentamente e comprendi queste istruzioni per l'uso. Conserva queste istruzioni per un uso futuro.

Descrizioni del prodotto

La mascherina facciale chirurgica monouso **GDA-MASK-01** è progettata per essere utilizzata in sale operatorie e in attività sanitarie con requisiti simili e per proteggere l'intero ambiente di lavoro. Realizzata con tre strati di TNT in Polipropilene opaco, inodore, con filtro ad elevata efficienza, morbida, priva di fibra di vetro, ipoallergenica e con buona permeabilità all'aria. La mascherina è dotata di elastici, privi di lattice, che consentono di adattarla ad una vasta gamma di dimensioni del viso garantendo un elevato livello di comfort. Rifiniture termosaldate.



La mascherina facciale ad uso medico **GDA-MASK-01** non contiene lattice di gomma naturale.



La mascherina facciale ad uso medico **GDA-MASK-01** è monouso ed è classificata come Dispositivo Medico di Classe 1 (dispositivo destinato ad essere utilizzato di norma per una durata continua inferiore a 60 minuti).

Controindicazioni

Questa mascherina non deve essere utilizzata se l'uso previsto della mascherina è quello di proteggere chi la indossa da agenti infettivi (batteri, virus o funghi);



Non utilizzare la mascherina se porti la barba o in presenza di altre condizioni che impediscono una buona tenuta tra la faccia e il bordo di tenuta della mascherina.

Non protegge da gas o vapori (es. gas anestetici).

Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

Questa mascherina non è stata progettata per essere utilizzata dai bambini.



Questa mascherina non è sterile. Non deve essere utilizzata in tutte le procedure che richiedono il requisito della sterilità.

Informazioni di carattere generale

Quando si respira, si parla, si tossisce, si starnutisce, ecc., si rilasciano piccole o grandi quantità di goccioline di secrezioni dalle mucose della bocca e del naso. La maggior parte dei nuclei ha un diametro tra 0,5 µm e 12 µm e soprattutto le goccioline più grandi possono contenere microrganismi provenienti dal sito di origine. I nuclei possono successivamente diffondersi attraverso l'aria in un sito suscettibile come una ferita operatoria aperta o un'attrezzatura sterile.

Le mascherine facciali ad uso medico di TIPO 2 sono utilizzare per i pazienti al fine di ridurre il rischi di diffusione delle infezioni, in particolare, in situazioni epidemiche o pandemiche.

Le mascherine di TIPO 2 sono destinate principalmente all'uso da parte degli operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili. Il livello di efficienza offerto da una mascherina dipende da una serie di fattori quali l'efficienza di filtrazione, la qualità del materiale e la vestibilità della mascherina sul viso di chi la indossa.

Specifiche tecniche

Fermanaso in alluminio rivestito in PP/PE per garantire la massima sicurezza.

Strato interno in TNT 100%PP 25 gr/mq; traspirante, soffice, ipoallergenico, resistente. Privo di resine, collanti e fibre di vetro.

Filtro intermedio in Melt Blown 100%PP 30 gr/mq - come da normativa EN 14683 classe II

Strato esterno in TNT 100%PP 25 gr/mq; traspirante, soffice, ipoallergenico, resistente. Privo di resine, collanti e fibre di vetro.

Elastici in Poliestere rivestito di filato di Nylon: morbido, ipoallergenico e privo di lattice

Cuciture con termosaldatura ad ultrasuoni ipoallergeniche

Confezionamento/Etichettatura

Le mascherine chirurgiche GDA-MASK-01 sono confezionate in scatole di cartone.

Il materiale utilizzato per il confezionamento non contiene lattice di gomma naturale né suoi derivati.

L'etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d'uso, il fabbricante, il mandatario europeo, il numero di lotto e la data di scadenza, in adempimento alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42 e smi recepite in Italia da DLgs. 46/97 e smi.

Il processo di progettazione, sviluppo, fabbricazione, commercializzazione rientra nelle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE

Come indossare e usare la maschera

- Ispeziona la maschera prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni. Esamina attentamente tutte le parti della maschera per rilevare eventuali danni; gli elastici, il fissaggio degli elementi alla maschera, la fascetta per il naso e la superficie della facciale. Se si rilevano danni o parti mancanti, la maschera va smaltita immediatamente. Una maschera difettosa può esporti al pericolo.
- Prima di indossare la maschera, esegui la disinfezione completa delle mani.
- Indossa la maschera osservando la sequenza descritta di seguito:



**COPRIRE LA BOCCA,
NASO E MENTO** e passare
gli elastici dietro le orecchie



**PREMERE LA
LINGUETTA METALLICA**
per fare aderire la mascherina al naso


- Se dopo aver indossato la maschera manifesti difficoltà respiratorie, vertigine, irritazione o altri tipi di malessere lascia immediatamente l'area contaminata e informa il supervisore. Rimuovi la maschera osservando le istruzioni.
- Se durante l'uso devi aggiustare la posizione della maschera fallo afferrandola solo dagli elastici: la parte esterna potrebbe essere contaminata. Se tocchi la superficie della maschera, esegui la disinfezione completa delle mani.
- **Non appendere la maschera al collo.**
- **Se la maschera è umida, sostituiscila con una nuova.**
- Una maschera usata deve essere smaltita quando non è più necessaria o tra due procedure, quando c'è un'ulteriore necessità di protezione, si dovrebbe indossare una maschera nuova.

Come togliere la maschera

- Senza toccare il facciale della maschera, afferra gli elastici dietro le orecchie.
- Tira indietro gli elastici in modo da liberare la maschera e staccala dal viso.
- Getta la maschera direttamente nel contenitore per la raccolta di rifiuti ospedalieri afferrandola solo dagli elastici. **Ricorda che le maschere usate sono considerate contaminate.** Per impedire potenziali contaminazioni, non riporre la maschera in tasca o dentro a indumenti o borse e non appoggiare la maschera su superfici (piani di lavoro, tavoli, mobilio in genere)
- Dopo aver tolto la maschera esegui la disinfezione completa delle mani.



Rimuovere la mascherina usata
**PRENDENDOLA SOLO
DAGLI ELASTICI**

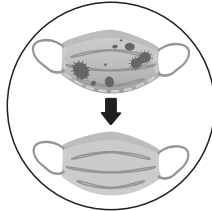

Per una protezione efficace
**CAMBIARE SPESSO LA MASCHERINA,
SE SPORCA O SE BAGNATA**



Buttare nell'apposito cestino
la mascherina usata
**LAVARE LE MANI CON
ACQUA E SAPONE**

Conservazione e durata

Conserva le maschere nella confezione originale, lontano da aree contaminate, polvere, luce solare, temperature estreme, umidità eccessiva e sostanze chimiche dannose. Se conservato nella confezione originale a temperature comprese tra -20°C e +40°C e con umidità relativa non superiore all'80%, il prodotto può essere utilizzato fino alla data specificata sulla confezione situata accanto al simbolo "Data di scadenza del prodotto".

Avvertenze e significato dei simboli presenti sulla confezione e nelle istruzioni

Tenere lontano dalla luce del sole	Non riutilizzare	Non utilizzare se l'imballaggio non è integro	Mantenere asciutto
Non contiene lattice di gomma naturale	Non lavare	RAEE non può essere conferito nei rifiuti generici, ma ad un centro di raccolta	Consultare le istruzioni per l'uso
Dispositivo non sterile	Attenzione: avvertenza importante	Nome e indirizzo del fabbricante	Nome referenza
Data di produzione	Data di scadenza	Non conservare a temperature superiori a 40°C	Numero lotto